

## ■ 猫カリシウイルス (FCV) 猫ヘルペスウイルス1型 (FHV-1) 猫クラミジア (*Chlamydomphila felis*)

項目名	検査材料	送付方法	所要日数	検査方法	検査項目の説明、注意事項
FCV 遺伝子	 口腔スワブ 鼻粘膜スワブ 結膜スワブ  適量	冷蔵	5日以内	RT-PCR	<ol style="list-style-type: none"> <li>検査材料を複数お送りいただいた際は、検査材料を混ぜて検査させていただきます。分けて検査することも可能ですが、検査料金がそれぞれについてかかります。分けて検査ご希望の際はその旨を備考欄にお書きください。</li> <li>検出率の高い検査材料は以下の通りです。 FCV……唾液と鼻汁 FHV-1……鼻汁と涙液 クラミジア……涙液と鼻汁</li> <li>採材時、粘膜細胞をかきとると検出感度が増します。</li> <li>セット検査をご用意しております。詳しくは料金表をご確認ください。</li> <li>FCVおよびFHV-1の抗体検査は猫ワクチンセットをご利用ください。</li> <li>鼻汁、涙液、唾液を滅菌綿スワブで拭ってください。カルチャースワブプラスやシードスワブのような<b>寒天培地の入ったスワブは使用しないでください。感度が低下します。</b></li> </ol>
FHV-1 遺伝子	 口腔スワブ 鼻粘膜スワブ 結膜スワブ  適量	常温冷蔵	4日以内	PCR	
クラミジア 遺伝子	 口腔スワブ 鼻粘膜スワブ 結膜スワブ  適量	常温冷蔵	4日以内	PCR	


### 【猫の呼吸器感染症の臨床徴候】

症状	FCV	FHV-1	クラミジア	ボルデテラ
全身倦怠	+	+++	+	+
くしゃみ	+	+++	+	++
眼脂	+	+++	+++	(+)
結膜炎	+	++	+++	-
角膜炎	-	+	-	-
鼻汁	++	+++	+	+
発咳	-	(+)	-	+
肺炎	(+)	(+)	+/-	+
流涎	-	++	-	-
口内炎	+++	(+)	-	-
跛行	+	-	-	-

infectious diseases of the dog and cat, 3rd ed. (2006) より抜粋

## ■ キャットフルセット (猫上部気道感染症セット)

- 猫の上部気道に感染する临床上重要な病原体をセットにした遺伝子検査です。
- 検査材料を複数お送りいただいた際は、検査材料を混ぜて検査させていただきます。分けて検査することも可能ですが、検査料金がそれぞれについてかかります。分けて検査ご希望の際はその旨を備考欄にお書きください。

項目名	検査材料	送付方法	所要日数	検査方法				
猫カリシウイルス (FCV) 猫ヘルペスウイルス1型 (FHV-1) 猫クラミジア ( <i>Chlamydomphila felis</i> ) マイコプラズマ ( <i>Mycoplasma felis</i> ) ボルデテラ ( <i>Bordetella bronchiseptica</i> )	 口腔スワブ 鼻粘膜スワブ 結膜スワブ  適量	冷蔵	5日以内	<table border="1"> <tr> <td>FCV</td> <td>RT-PCR</td> </tr> <tr> <td>FHV-1 猫クラミジア マイコプラズマ ボルデテラ</td> <td>PCR</td> </tr> </table>	FCV	RT-PCR	FHV-1 猫クラミジア マイコプラズマ ボルデテラ	PCR
FCV	RT-PCR							
FHV-1 猫クラミジア マイコプラズマ ボルデテラ	PCR							